




En biokemisk, aktiv gel för bättre rengöring vid depuration.

Perio+ appliceras i tandfickan där den mjukar upp degenererad vävnad och verkar bakteriehämmande.

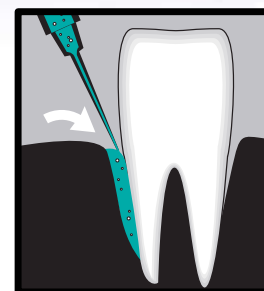

+ Underlättar depuration och förbättrar rengöring

Perio+ biokemiska innehåll bidrar till bättre rengöring av rotyta och omgivande vävnad genom att mjuka upp degenererad vävnad som genom depuration kan tas bort ur tandfickan.

Gelen är icke-toxisk och helt miljövänlig med koksalt och syrgas som enda restprodukter från oreagerad hypoklorit.

+ Lättanvänd och skonsam för både patient och hygienist

Den vanliga behandlingsmetoden är att applicera Perio+ i tandfickan, låta verka i 30 sekunder, depurera och sedan repetera applikation och depuration en andra gång.

Genom applikation av Perio+ blir depurationen skonsammare för patienten och enklare för tandhygienisten eftersom friktionen mellan rotytan och handinstrumentet minskar.

+ Bakteriehämmande och lämnar frisk vävnad intakt

Perio+ aktiva ingredienser verkar bakteriehämmande och motverkar grogrunden för både aeroba och anaeroba bakterier.

Perio+ påverkar endast degenererad vävnad och lämnar frisk vävnad helt intakt.

LÄS MER OCH BESTÄLL PÅ WWW.PERIOPLUS.SE